

Fontos tudnivalók az alábbi termékekről

Tamponok:

Higiénikus, egyenként csomagolt tamponok, melyek optimális védelmet adnak azokon a napokon is. Ezek a Bőrgyógyászati és klinikailag tesztelt tamponok, akár szeretkezés közben is használhatók, ugyanis puha szivacsból készültek, alig érezhetők. Formájának és nedvszívó képességének köszönhetően helyettesítheti vele korábbi, kényelmetlen tamponját, sőt még szaunában, vagy úszáshoz is ideális. Könnyű eltávolítani a szélébe vágott karima segítségével.

Nedvszívó hatása kisebb, mint a normál tamponoké, gyakoribb cserét igényel, vérzéstől függően.

Menstruációs kehely:

Menstruációs csésze a nehéz napokon, szuper egyszerűen kihúzható, félkör alakú fogantyúval!

Mi is az intimtölcsér, vagy menstruációs kehely?

Egy harang alakú, rugalmas, maximálisan latexmentes, szilikonból készülő eszköz, amely a menstruáció alatt a hüvelybe helyezve összegyűjti a menstruációs folyadékot.

Miért érdemes kipróbálni?

Előnyök:

Nem tartalmaz semmiféle vegyi anyagot, fehérítőt, ami allergiás reakciót válthat ki. Vattaszálaktól mentes, mely sok esetben kiváló táptalajt biztosíthat a nem kívánt kórokozóknak. A tamponnal ellentétben nem szükséges eltávolítani vizelet-, vagy székletürítés közben. A felhelyezés és eltávolítás kevésbé irritálja a hüvely nyálkahártyáját. A hüvelyflórát is kíméli, ugyanis a természetes hüvelyváladékot nem szívja magába, csak a menstruáció során keletkező folyadékot gyűjti össze.

Akár háromszor nagyobb mennyiségű vért képes tárolni a tamponhoz képest, így elegendő csupán 8 óránként üríteni. Éjszaka is használható.

Kiválóan alkalmas aktív tevékenység, sportolás, úszás közben is.

Hátrányok lehetnek:

Szokatlan felhelyezési mód miatt, időbe telhet a megfelelő felhelyezési módszer elsajátítása, valamint az eszköz napi szintű rutinos tisztítása. Néhány esetben, alkattól függően kényelmetlen lehet. A nők 90%-a azonban csupán néhány nap alatt megszokja a használatát.

Felhelyezés:

A szilikonból készülő eszköz szájának oldalát be kell nyomni, így kell a hüvelybe tolni. Amint a helyére kerül, a szája magától kipattan (lásd képek között ábrák).

Összegzés:

higiénikusabb nem szivárog légmentesen gyűjti a folyadékot, így elkerülhetőek a kellemetlen szagok elegendő csupán 8-12 óránként kiüríteni (naponta 2-3 alkalommal), elmosni (mérettől, menstruáció erősségétől függően) anyaga nem okoz irritációt érzékenyeknél sem több méret elérhető gazdaságosabb