

Fontos tudnivalók az alábbi termékekről

Terhességi teszt:

Használata:

- A teszt elvégzéséhez célszerű a reggeli első vizeletet használni
- Gyűjtse a vizeletmintát egy tiszta száraz pohárba • Helyezze a nyíllal és jelzővonallal ellátott végét függőlegesen a vizeletmintába és várjon 10 másodpercet
- Ne merítse a tesztcsíkot a vizeletbe a nyilakkal jelölt vonal fölé!
- Fektesse száraz tiszta felületre • Ezt követően 3 perc elteltével olvassa le az eredményt, 10 percen túl az eredmény már nem leolvasható
- Ha szükségesnek érzi, ismételje meg pár nap múlva a tesztet.
- Amennyiben a teszt pozitív, úgy mihamarabb lépjen kapcsolatba orvosával.
- Egy teszt csak egyszer használható!

TIPP:

A nap folyamán bármikor elvégezhető vele a terhességi teszt, de mégis javasolt a reggeli első vizelettel használni, ugyanis ebben az időpontban a terhességi hormon nagyobb mennyiségben van jelen a vizeletben.