



Használati útmutató és termékleírás Pénisznyújtó készülékekhez

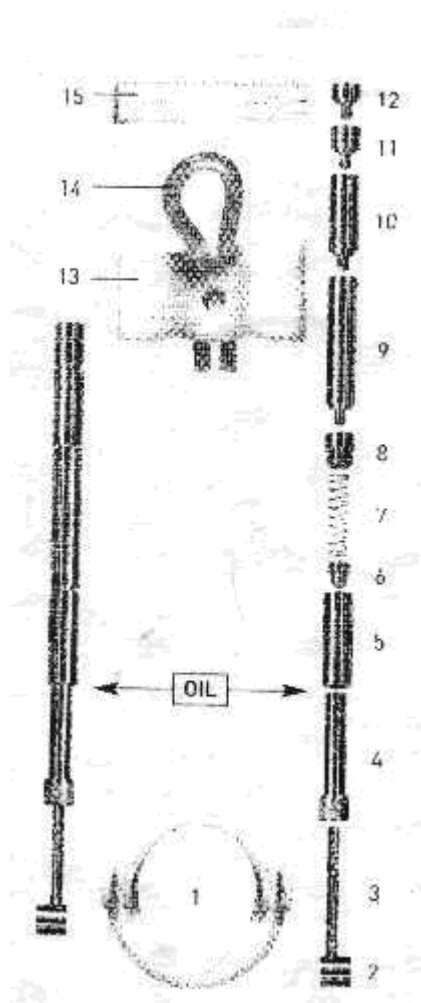

1. ábra

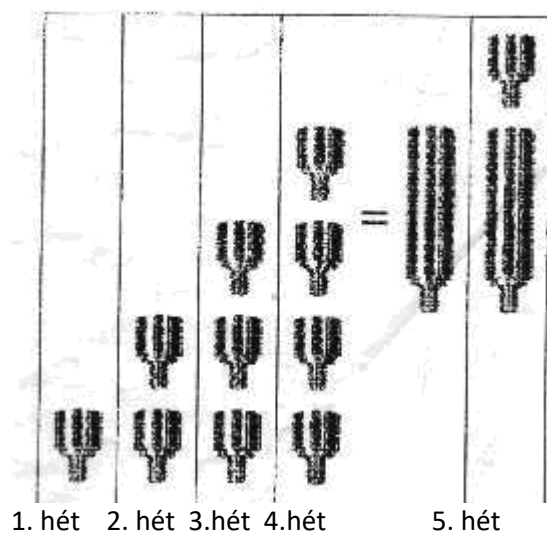

2. ábra A változás lépései

14. ábra A változások havi bontásában					
Hónap	Adatok	Erekciós hossz	Ernyedt állapot hossza	Erekciós kerület	Ernyedt állapot kerülete
0	- -				
1	- -				
2	- -				
3	- -				
4	- -				
5	- -				
6	- -				
7	- -				
8	- -				
9	- -				
10	- -				
11	- -				
12	- -				

13. Feszítőerő

A kezdeti feszítőerő **600 gr**. Ezt azáltal érhetjük el, hogy az eszköz hosszúságát 4 cm-rel kisebbre állítjuk be, mint a pénisz erekciós hossza. A második hónap során a feszítőerő **800 gr**. Ekkor az eszköz hosszát az erekciós állapotban lévő pénisz hosszával megegyezőre kell beállítani. A harmadik hónapban a feszítőerő **1000 gr** lesz, ekkor már az eszközt 2 cm-rel hosszabbra állítjuk, mint az erekciós hossz. A negyedik és hatodik hónapban a feszítőerő **1200 és 1500 gr** közötti értéket ér el. Az Andro-Pénisz♦ méretnövelése eredményeként ez az erő **automatikusan** beáll a megfelelő szintre. Ez a fajta feszítőerő nem okoz sérülést a péniszen, mivel hatása **kismértékű, fokozatos és alkalmazkodó**.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. TERMÉKLEÍRÁS

Az Andro-Pénisz♦ orvosok által kifejlesztett eszköz, és rendelkezik az Európai Unió Közegészségügyi Szervezetének CE-tanúsítványával. Az Andro-Pénisz♦ a következő alkotórészekből áll: műanyag gyűrű alap-alkotórész, két fémhuzal belső rugókkal, valamint egy szilikonpánttal ellátott műanyag váz. A műanyag alkotórészek a POM elnevezésű alapanyagból készültek (ezt a fajta szintetikus anyagot nem károsítják a gyúlékony folyadékok, mint pl. az alkohol). A pánt orvosi célokra használatos szilikonból, vagy latexből készül. A fémhuzalok alapanyaga ón, felületük vékony nikkelréteggel bevont. A rugókat rozsdamentes acélból gyártják.

ALKOTÓRÉSZEK (1. sz. ábra): 1 műanyag gyűrű alap, 2 kerek összekötőelem lyukkal a közepén, 3 csuklós csavarok, 4 állítható rúdcsavar, 5 fémhuzal, 6 csavar, 7 rugó, 8 rugótámasztó csavar, 9 4 cm hosszúságú tengely, 10 2 cm hosszúságú tengely, 11 0,5 cm hosszúságú tengely, 12 0,3 cm hosszúságú tengely, 13 felső műanyag támaszték, 14 szilikonpánt, 15 védőpárna (Andro-Top♦).

MEGJEGYZÉS: Feltétlenül szükséges egy csepp olajat cseppenteni a 3. és 5. számú alkotórészek közé, a kellő sikamlósság elérése érdekében (lásd az ábrán: Olaj).

2. AZ ANDRO-PÉNISZ♦ KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI

- **Andro-Pénisz♦:** erekciós állapotban 10 cm-nél hosszabb péniszhez.
- **Mini- Andro-Pénisz♦:** erekciós állapotban 6 és 10 cm közötti hosszúságú péniszhez.
- **Andro-Pénisz♦ Gold:** (nikkel-érzékenység esetén): erekciós állapotban 10 cm-nél hosszabb péniszhez.



3. JAVALLATOK, ELLENJAVALLATOK

Hímvesztő-hosszabítás céljára használatos. Péniszgörbület korrigálására is alkalmas, műtéti beavatkozás nélkül. Javasolt továbbá használata „Peyronie”-szindróma esetén, valamint péniszhosszabbító műtét utókezeléseként, illetve bármely egyéb péniszkorrigáló műtéti beavatkozást követően.

Mellékhatások: Cukorbetegség esetén kérjük ki kezelőorvosuk tanácsát használat előtt, és tanácsos rendszeres kontrollvizsgálatokra járniuk. Nem lépnek fel mellékhatások a használati utasítás pontos betartása esetén.

4. A PÉNISZ MÉRETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Első lépésben egy mérőszalaggal mérjük meg a pénisz hosszát, valamint kerületét ernyedt állapotban. Ezt követően végezzük el ugyanezen méréseket erekcióban (3. és 4. számú ábrák). Írjuk be a mért adatokat a 14. számú táblázatba.

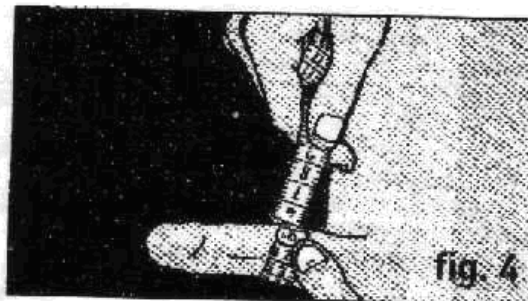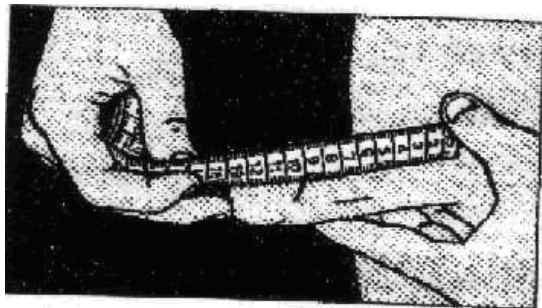

5. AZ ANDRO-PÉNISZ◆ KEZDETI MÉRETE

Az **Andro-Pénisz◆** kiindulási mérete 9 cm, a **Mini- Andro-Pénisz◆**-é pedig 7 cm. Az eszköz mérete a műanyag gyűrű alap alsó széle és a fémtengely felső széle közötti távolsággal egyenlő (6. számú ábra). Az **Andro-Pénisz◆** kiindulási hosszát úgy állítjuk be, hogy az 4 cm-rel kevesebb legyen, mint a pénisz erekciós hossza (lásd a számítási példát). Péniszgörbület, vagy egyéb jellegű probléma esetén a számításakor 5 cm-t kell levonni.

Erekciós hossz: 15.7 cm – 4 cm = 11.7 cm → az **Andro-Pénisz◆** kiindulási hossza 11.7 cm


Most készítsük elő az eszközt a kiszámított méretnek megfelelően. Először válasszuk le a 13. számmal jelzett felső műanyag támasztékot, felfelé húzva azt (5. sz. ábra). Ezután csatlakoztassunk a 8. számú elemhez (6. számú ábra) annyi tengelyalkotórészt, amennyi elegendő a kiszámított méret eléréséhez (6. számú ábra).

A következő méretű tengelyalkotórészek állnak rendelkezésre: 4 cm-es, hosszú tengely (9. számú alkotórész); 2 cm-es, közép méretű tengely (10. számú alkotórész); 0,5 cm-es, kicsi tengely (11. számú alkotórész); 0,3 cm-es, mini tengely (12. számú alkotórész); (lásd a számítási példát).

11.7 cm.=Andro-Pénisz◆ kiindulási mérete(9 cm) + 10.sz.alk.rész (2cm) +11.sz.alk.rész (0,5 cm).

Amennyiben a kiszámított személyes kiindulási méret kisebb, mint az **Andro-Pénisz◆** kiindulási mérete, akkor a kezelést az **Andro-Pénisz◆** kiindulási méretével kell kezdenünk.

6. ADAPTÁCIÓS IDŐSZAK

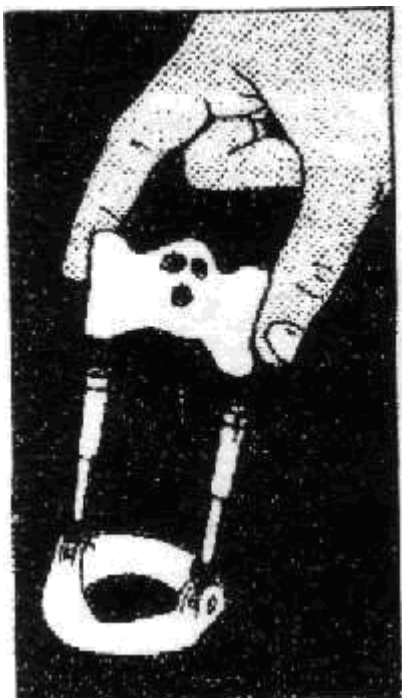

Napok	Az Andro-Pénisz♦ mérete	Használati időtartam
1.-5. nap	az Andro-Pénisz♦ kiindulási hossza	3 óra naponta
6.- 10. nap	A 6. napon mindkét oldalon hosszabbítsuk meg egy-egy 11.sz. alkotóelemmel	6 óra naponta
11.- 15. nap	A 11. napon mindkét oldalon hosszabbítsuk meg egy-egy 11.sz. alkotóelemmel	8 óra naponta

7. TOVÁBBI LÉPÉSEK



Kétféle módszer közül választhatunk:

Hagyományos Módszer (javasolt)	Minden hetedik napon mindkét oldalon hosszabbítsuk meg egy-egy 11.sz. alkotóelemmel. JAVASOLT (ld.: 2.sz. ábra)	9 óra naponta
Speciális módszer	Minden harmadik napon mindkét oldalon hosszabbítsuk meg egy-egy 11.sz. alkotóelemmel.	4 óra naponta

A 9 illetve 4 óra hosszú időtartamot részekre oszthatjuk. Amikor szükségesnek érezzük, tartsunk szünetet, és masszírozzuk meg a péniszt. Négy darab 11. számú alkotóelemet már helyettesíthetünk egy darab 10. számú elemmel (közepes méretű tengely, 2 cm hosszúságú).

A harmadik hónaptól kezdve az **Andro-Pénisz♦** méretét csak lassabb ütemben növelhetjük. Minden második héten egy-egy 11. számú alkotóelemmel hosszabbítsuk meg az eszközt. Részlegesen is elvégezhetjük a méretnövelést, ha egy darab 12. számú elemet alkalmazunk, majd pár nap múlva helyettesíthetjük azt egy darab 11. számú tengelyrésszel.


Amennyiben a speciális módszert választjuk, a kívánt változásokat lassabb ütemben érhetjük csak el.


8. HOGYAN VISELJÜK AZ ANDRO-PÉNISZ♦-t

A szilikonpántot (14.sz. alkotórész) vezessük bele az (Andro-Top♦) védőpárnába. Az (Andro-Top♦) használata kötelező. Javasoljuk, hogy fedje be a péniszt továbbá vattával, vagy sebkötéssel (7. sz. ábra).

Amennyiben a pénisz nincsen körülmetélve, akkor húzzuk hátra az ernyedt állapotú péniszen lévő, makkot takaró előbőrt egészen a pénisz tövéig (8. sz. ábra). Most húzzuk a péniszt egy kissé kifelé, amely ezáltal, még mindig ernyedt állapotban, nagyobbá válik. A szilikonpánt végeit vezessük be a felső műanyag támaszték (13. számú alkotórész) hátsó oldalán található lyukakba, ezáltal a pánt egy hurkot formál.

Húzzuk rá a pénisz tövére a műanyag gyűrű alapot (1.sz. alkotórész), miközben a makkot ráhelyezzük a felső műanyag támaszték (13. számú alkotórész) mélyedésére. Tegyük bal kezünket a felső műanyag támasztékra, majd nyomjuk az eszközt a test irányába, hogy összelapuljanak a belső rugók (9. számú ábra).

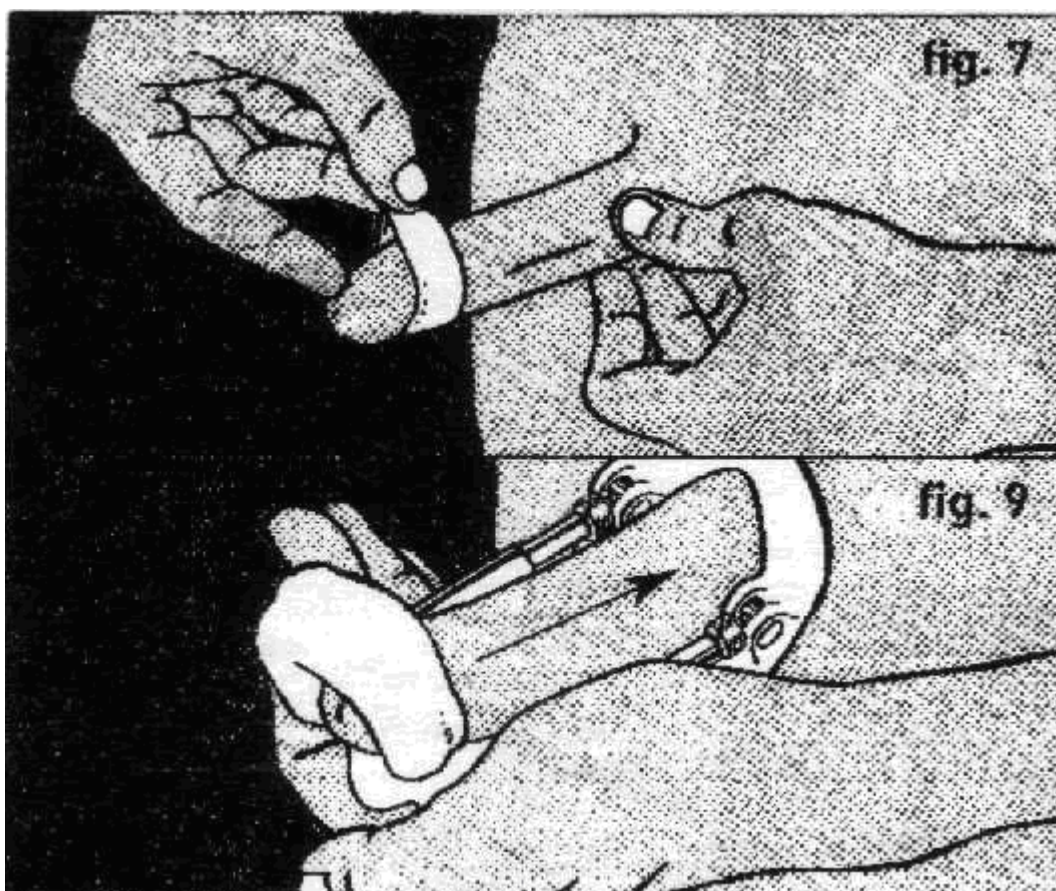

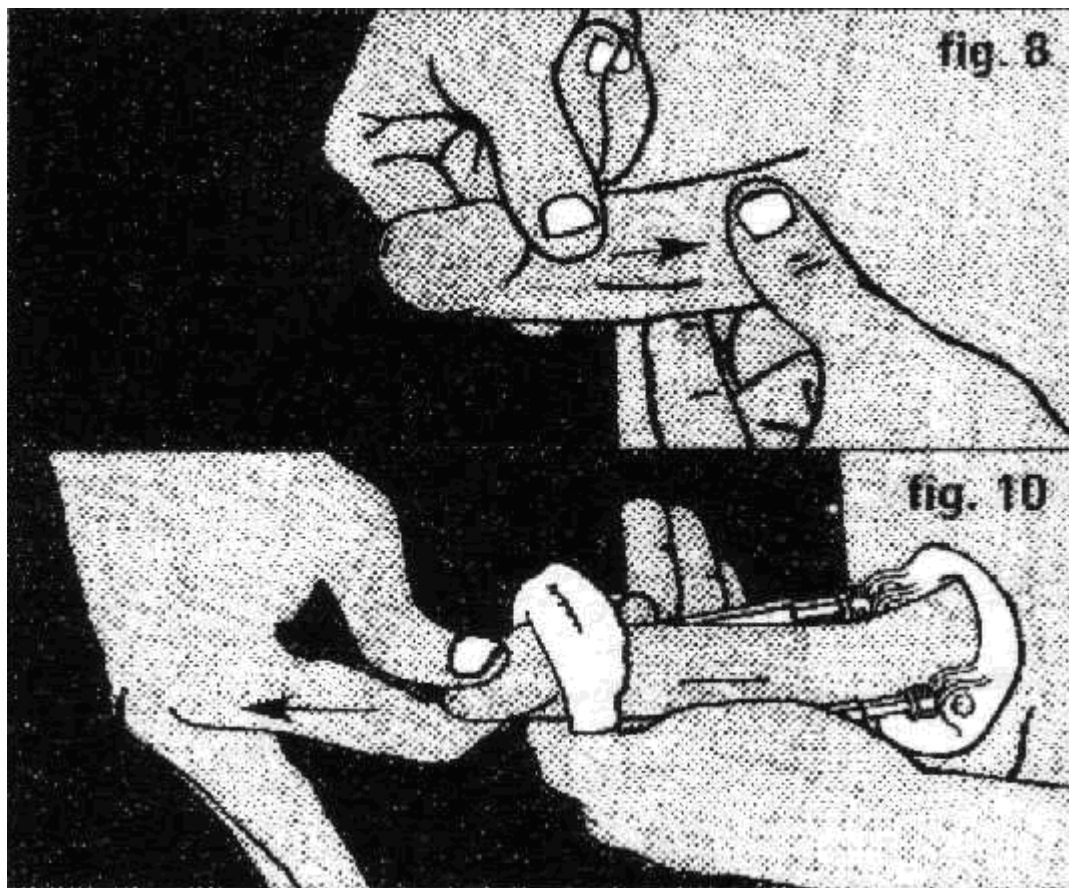

Bal kezünket továbbra is az eredeti helyzetben tartva, jobb kezünk ujjait vezessük be a szilikonpánt által képzett hurokba. Húzzuk át a makkot a hurkon (10. számú ábra).


Helyezzük a bal kéz hüvelykujját a frenulumra, miközben fokozatosan állítsuk be szorosabbra a hurkot, a szilikonpánt mindkét végének meghúzásával (11. számú ábra).

Lassan húzzuk a bőrt mindkét oldalon a test irányába, elkerülve ezáltal a frenulum becsípődését, vagy bőrredők képződését a makkon (12. számú ábra).

A szilikonhuroknak olyan módon kell illeszkednie a makkra, hogy ne irritálja annak felületét, de elég szoros legyen ahhoz, hogy megakadályozza a makk kicsúszását.

Óvatosan rögzítsük a szilikonpántot a felső műanyag támaszték (13. számú alkotórész) hátsó vágatába olyan módon, hogy felfelé húzzuk a pánt szabad végeit. Feszítsük meg, de ne húzzuk lefelé, elkerülendő a becsípődést.

További információk találhatóak a www.andromedical.com honlapon, illetve a tájékoztató CD-ROM-on.

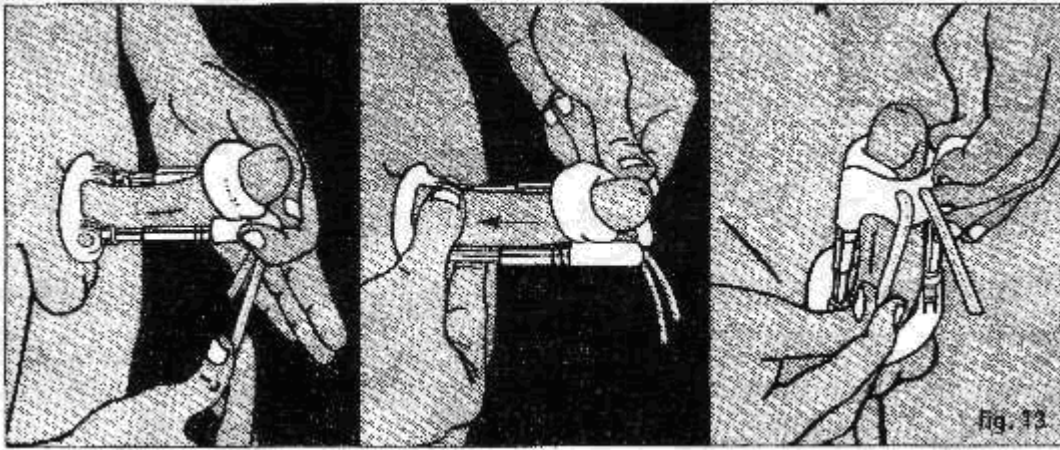

9. AZ ANDRO-PÉNISZ♦ HASZNÁLATA

Az eszköz használata során legyünk TÜRELMESEK és KITARTÓAK. Ez az egyetlen módja annak, hogy célunkat elérjük. Az első napokban helyezzük fel, majd vegyük le az eszközt naponta 10 alkalommal.

Minden második órában el kell távolítani az eszközt a péniszről, és pihentetni kell a szerv szöveteit néhány percen át. Ezek a pihenőidőszakok kötelezően betartandóak. Az előrehaladott fázisban a pihentetés már óránként, illetve másfél óránként szükséges. A szünetek alatt masszírozzuk át a péniszt.

Tanácsos az eszközt felfelé hajlítva hordani, a cipzár mögötti területen. Törekedjünk a kényelmes használatra, laza fehérnemű és nadrágok segítségével is. Az eszközt minden negyedik napon tisztítsuk meg PH semleges szappannal és vízzel.

Amennyiben ön félbeszakítaná az eszköz viselését 15-30 napon át, akkor az eszköz hosszát egy cm-rel kevesebbre kell beállítani, mint a legutóbb hordott méret. Öt nap múltán a hossz 0,5 cm-rel növelhető, és minden további ötödik napon újra növelhetjük a méretet 0,5 cm-rel. Ez után a tíz napos hozzászoktatási időszak után folytatható az eredetileg választott módszer.

10. SPECIÁLIS ESETEK

PÉNISZGÖRBÜLETEK KORRIGÁLÁSA: Az eszközt a görbület ellentétes oldalára helyezzük fel. 6-8 havi használat javasolt, ha 70 %-os mértékű javulást kívánunk elérni. A pénisz hosszának növekedése ekkor kisebb mértékű lesz, mivel a hosszabbítás csak a görbült szakaszt érinti. Ekkor a hagyományos módszert használjuk.

PEYRONIE-SINDRÓMA: Lásd az előző esetet. Tanácsos, hogy az **ANDRO-PÉNISZ♦-t** a háziorvos által előírt egyéb kezelésekkkel összhangban használjuk.

A PÉNISZ MŰTÉTI MEGHOSSZABBÍTÁSÁT KÖVETŐEN: Kövesse a kezelőorvos utasításait, és az eszközt a műtét után 3-4m héttel kezdje el használni. A Hagományos Módszert válassza.

ANDRO-PÉNISZ HORMOKEZELÉS MELLETT: Amennyiben Önt tesztoszteron hormonnal kezelik, az elérhető eredmények gyorsabbak és nagyobb mértékűek. Ekkor a kezelést orvosi felügyelet alatt kell folytatni. Vérvizsgálati tesztek segítségével kizárhatóak azok a tényezők, melyek lehetetlenné teszik az eszköz használatát.

VARIOCELÁS BÖRBETEGSÉG ESETÉN: az alap támasztó gyűrűt teljes felületén ki kell párnázni.

P8344533

11. ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az eszköz használata tilos alkohol, vagy drog fogyasztása mellett. TILOS használata sporttevékenység közben, ekkor távolítsuk el az eszközt tisztítás, illetve vizelés céljából.

Amennyiben a makk felületén kékes elszíneződést, fájdalmat, vagy kényelmetlen érzést tapasztal, távolítsa el az eszközt és masszírozza át a péniszt. Ezáltal a pénisz eredeti színe visszatér, és megszűnik a kellemetlen érzet.

Amennyiben kellemetlen érzést tapasztalna a makk tövéénél, tanácsos vattával vagy gézzel betakarni ezt az érzékeny felületet.

Hirtelen erekció esetén nem kell aggódnia, ez teljesen normális jelenség. Az eszköz eltávolításakor csípő-szúróérzést tapasztalhat, melyet a szövetek ellazulása vált ki, a feszültség állapota után, tehát aggodalomra nem ad okot.

Normális jelenség, ha kétórai használat után kényelmetlen érzése támad. Ez annak a jele, hogy a szöveteknek ellazulásra van szükségük. Távolítsa el az eszközt, és két percen keresztül masszírozza meg a péniszt. Ezt követően az eszköz újra felhelyezhető.

Még akkor is, ha általában nem szokott kellemetlenségeket tapasztalni az eszköz használatakor, pár nap erejéig felléphet ilyen érzés. Ez nem ad okot aggodalomra, az eszköz használata folytatható. Amennyiben kis fehér felületek megjelenését tapasztalja a makk felületén, ne aggódjon, ez ugyanis ödéma, illetve vizenyő tünete, és azt jelzi, hogy a hurok beállítása túl szoros. Masszírozás hatására a jelenség megszűnik.

Amennyiben a péniszen seb vagy sérült felület található, vagy Önnek nemi betegsége van, az eszköz használata TILOS a teljes gyógyulásig.

Ha fehéres sebek képződnének a makkon, azonnal forduljon orvoshoz, mert ez gombásodás jele lehet.

FONTOS: Amennyiben ön hajnövekedést serkentő szert, antidepresszánt, altatót vagy nyugtatót szed, az Andro-Pénisz által elérhető végeredmény jelentősen kisebb lehet.

P8344703

12. GYÓGYKENŐCSÖK

IRRITÁCIÓ-ELLENES KENŐCS:

Elkészíthető a gyógyszerárban, de készen is kapható. Hatóanyagai: Thunderbolt Asiatica 0,010 gr, Neomycin Szulfát 0,0035 gr és 1 gr kötőanyag.

Példa: Európában a kenőcs „Blastostimuline” néven kerül forgalomba, az Egyesült Államokban elnevezései a következők: Neosporin, Bacitracin, vagy Neosporin kenőcs.

-Kidörzsölődés esetén: Az este folyamán alkalmazza a Blastostimuline, vagy Neosporin kenőcsöt, és használja nappal az eszközt.

- Tartós kidörzsölődés esetén: Keresse fel kezelőorvosát.

GYÓGYKENŐCS SEBKEZELÉSRE

Elkészíthető a gyógyszerárban, de készen is kapható. Összetevői 100 gramm kenőcsre számítva: 27 gr cinkoxid és 0,5 gramm standardizált csukamájolaj (amely A és D vitamin tartalmú), valamint kötőanyag. Európában a kenőcs neve Mitosyl.

-Amennyiben seb képződik: Ne használja az eszközt négy napon keresztül. Az első két napon alkalmazza a Neosporin kenőcsöt naponta háromszor, majd a hátralévő kéz napon naponta két alkalommal.

GYULLADÁSGÁTLÓ KENŐCS

Amennyiben gyulladás alakulna ki, gyulladás gátló kenőcs használata szükséges. Nevei: USA-Cortaid; Európa: Hirudoid.

HIDRATÁLÓ KRÉM

Amennyiben a pénisz belsejében kellemetlen érzést tapasztalna, masszírozza át azt hidratáló krémmel, gyengéden paskolgatva mintegy 5 percen át az este folyamán.